



Instruções para

1. coleta de esfregaço nasal O kit de coleta de esfregaço nasal consiste em um tubo de meio de transporte codificado por QR, esfregaço quebrável e uma bolsa de risco biológico.

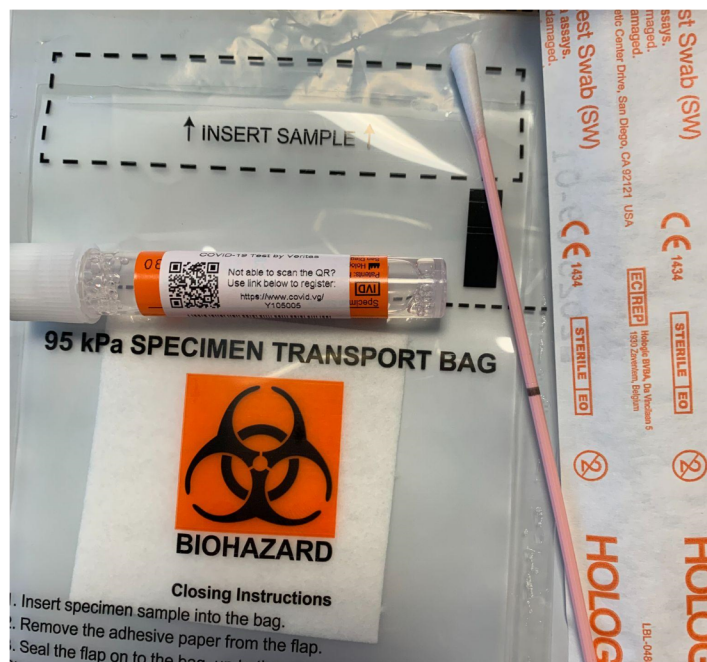


2. No dia do teste, o aluno e / ou pais digitalizam o código QR no tubo usando um telefone celular e, no site de registro da Veritas, fornece **o nome completo do aluno e a data de nascimento. Certifique-se de que o nome e o sobrenome do aluno correspondem às informações fornecidas pelos pais / responsáveis durante o processo de inscrição.**
 - a. Se o QR não funcionar ou for mais fácil, o aluno e / ou os pais também podem usar o link no tubo (covid.vg/[BARCODE]) para começar.

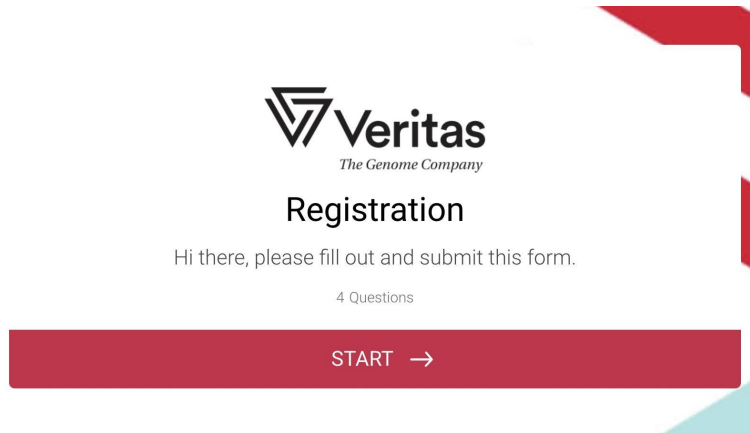

The image shows a registration form for Veritas, The Genome Company. At the top is the Veritas logo with the tagline 'The Genome Company'. Below the logo, the word 'Registration' is centered. A message says 'Hi there, please fill out and submit this form.' followed by '4 Questions'. A large red button with the text 'START →' is at the bottom.

3. A segunda etapa pergunta se o aluno foi inscrito pelo pai ou responsável no programa, Clique no link abaixo para inscrever o aluno.

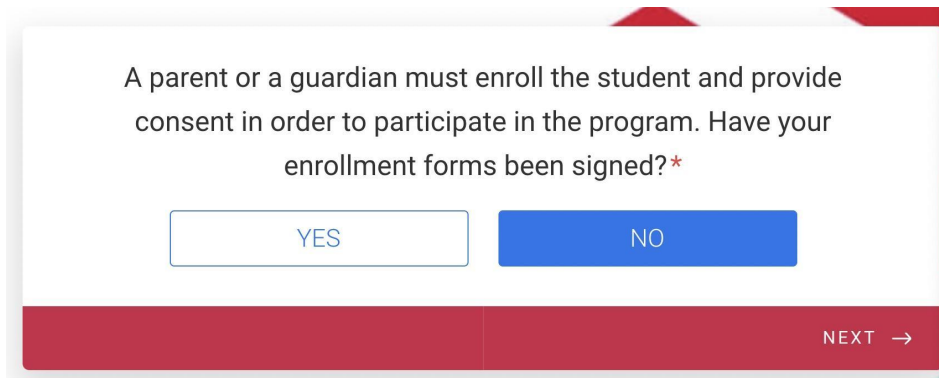

The image shows a consent form for enrollment. The text reads: 'A parent or a guardian must enroll the student and provide consent in order to participate in the program. Have your enrollment forms been signed? *'. Below the text are two buttons: 'YES' (white with a blue border) and 'NO' (solid blue). At the bottom right, there is a red button with the text 'NEXT →'.

- 4.
- Identifique o tubo do meio de transporte: Escreva do aluno **data de nascimento e o nome completo**. As iniciais também são uma alternativa aceitável ao nome completo e no tubo no espaço fornecido. **Certifique-se de que esta informação esteja claramente escrita e correta.**
5. Limpe cada narina por 10 segundos, inserindo o cotonete na narina até que você não consiga mais ver a ponta do algodão e, em seguida, gire-o.
- uma. **NÃO:**
- force a zaragatoa mais para dentro do nariz em qualquer ponto.
 - Continue se houver dor
 - . Reinsira a zaragatoa na narina depois de ter tocado no meio de transporte.

6. Coloque a zaragatoa no tubo e quebre a pega contra a lateral do tubo **na linha preta**.
7. Gire a tampa e verifique se o tubo está bem fechado para evitar vazamentos.
8. O aluno devolve a amostra ao funcionário do CIC.